

器12 理学診療用器具
一般医療機器 再使用可能な止血帯 17230000

NARターニケット

禁忌・禁止

衣服内の固形物の上へ使用してはいけない。

【形状・構造及び原理】

製品名	NARターニケット	
型式	CAT	EMS
製品番号	NAR3001	NAR3023
形状		

- 止血帯を巻き上げるにより、圧力を加え血流を遮断する。

【原材料】

バンド：ナイロン
バックル：プラスチック
巻き上げロッド：プラスチック
クリップ：プラスチック

【使用目的又は効果】

- 上肢あるいは下肢に装着し、出血を止める。
- 循環血液の流出を防ぐ。

【使用方法】

1-A. ツーハンドオペレーション：

上肢あるいは下肢の出血部から上部 5.0 ～ 7.5cm でバンドを肌に直接巻き、レッドティップをバックルに差し込む。

1-B.

ワンハンドオペレーション：

装着前にバンドをバックルに通してループさせる。それから出血部の四肢をループに挿入させる。出血部から上部 5.0 ～ 7.5cm で、肌面に直接配置する。

- バンドを強くしっかり引く。
次にバンドを創傷部周囲に巻きつけベルクロで自着させ、固定する。その時バンドがロッドクリップの上を覆わないようにする。
指先 3 本がバンドと肌の間に指し込めるなら締め直す。
- 止血するまでロッドを廻す。
- ロッドをロッドクリップでロックする。血流とパルスをチェックする。止血されないかあるいはパルスがあるときは、更にバンドを強く締める。または、セカンド C-A-T の追加を考慮する。
(場所はファースト C-A-T のすぐ上)
- バンドをクリップの中を通しロッド上部を覆う。
ロッドとバンドをタイムストラップで固定し、C-A-T 装着時刻を記録する。

【使用上の注意】

- 使用法のトレーニングを受けた隊員あるいは医師の監視の下で使用する。
- 負傷者を移動する前に巻き上げロッドとバンドがクリップにしっかり固定されていることを確認する。
- 出血場所を確認出来ないかあるいは調べる時間がない場合は、できるだけ腕や脚の上部(付け根の近く)に、C-A-T を当てる。(衣服の上からでも構わない。)衣服の上から当てる場合は、衣服の中に固形物がないか確認する。
状況が許せば、できるだけ早く受傷した四肢の出血場所を調べ、出血場所の 5cm ～ 7.6cm 上へ CAT を当て直す。

【保管方法及び有効期間】

- 直射日光及び高温多湿を避け室温にて保管

【主要文献及び文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アコードインターナショナル株式会社
151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4
TEL:03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752

製造業者：ノースアメリカンレスキュー社
North American Rescue, LLC.
(アメリカ・サウスカロライナ州)