

器12 理学診療用器具
一般医療機器 再使用可能な止血帯 17230000

SAMターニケットXT

禁忌・禁止

衣服内の固形物の上へ使用してはいけない。

【形状・構造及び原理】

製品名	SAMターニケットXT	
型式	ブラック	オレンジ
製品番号	SAMXT-M	SAMXT-C
形状		

- 止血帯を巻き上げることにより、圧力を加え血流を遮断する。

【原材料】

ストラップ：ナイロン
バックル：プラスチック
プレート：プラスチック
ロッド：アルミニウム

【使用目的又は効果】

- 上肢あるいは下肢に装着し、出血を止める。
- 循環血液の流出を防ぐ。

【使用方法】

- 損傷部を確認し、SAMターニケットを腕あるいは脚の周囲、損傷部の上約5～7.6cmの位置、皮膚へ直接装着する。
- バックルの開口部に下からストラップの先端を挿入する。バックルの近くでストラップをつかみ、バックルがオートロックするまで引っ張る。テンションを保ちながら引いたストラップを下のストラップへ貼り付け固定する。

- 出血が止まるまで、アルミ製のロッドを回転させ、ストラップを巻き上げる。
- ロッドをCフックの内側に引っ掛け固定し、出血が止まったことを確認する。出血が続く場合は、ロッドをもっと回転させ、さらに締め付ける。それでも出血が止まらない場合は、2つ目を最初のSAMターニケットの側に追加する。出血が止まったことを確認する。
- 余ったストラップをCフックの間、ロッドの上を通し、腕あるいは脚の周囲に巻く。タイムバンドをCフックの上から貼り付け固定する。使用した時間を記録する。

【使用上の注意】

- SAMターニケットを衣服の上から装着する時は、衣服内に固いものが無いことを確認する。
- 損傷部がすぐにわからない場合は、SAMターニケットを損傷した腕あるいは脚のできるだけ高い位置に装着する。状況が許せば、損傷した四肢を再評価し、SAMターニケットを損傷部の上約5～7.6cmの位置、皮膚に直接装着する。
- 使用方法のトレーニングを受けた隊員あるいは医師の監視の下で使用する。

【保管方法及び有効期間】

- 直射日光及び高温多湿を避け室温にて保管

【主要文献及び文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アコードインターナショナル株式会社
151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4
TEL:03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752
製造業者：ザ・シーバーク・カンパニー
The Seaberg Company, Inc.
(アメリカ・オレゴン州)